


Transatlantic – Ihr Experte für Umlagerungshilfen


Transatlantic produziert und vertreibt seit mehreren Jahrzehnten Umlagerungshilfen aller Art. Dabei spielen die Rutschbretter als Umsetzhilfen eine große Rolle. Sie finden in unserem Sortiment für jedes Anliegen die optimale Lösung:



Rutschbrett Silber Gleiter
der Klassiker in allen Bereichen

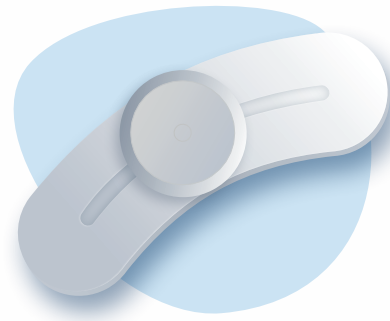

Rutschbrett Beasy
Das Pflegerutschbrett mit dem Drehteller

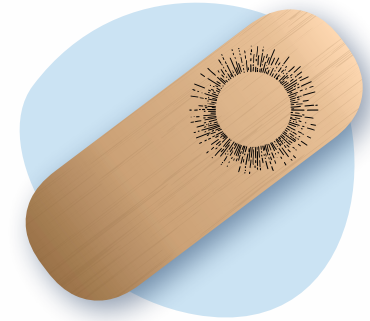

Rutschbrett meinHOLTZ
Das Designprodukt mit individuellen Motiven



Was ist ein Rutschbrett?

Rutschbretter erleichtern das Umsetzen von Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit. Sie bilden eine Brücke zwischen dem Rollstuhl und einer weiteren Oberfläche, wie z.B. dem Bett, der Toilette oder dem Autositz.

Wer kann ein Rutschbrett verwenden?

Grundsätzlich kann jeder ein Rutschbrett verwenden, dem es schwer fällt sich vom Rollstuhl aus umzusetzen. Es ermöglicht einen aktiven Transfer mit größtmöglicher Selbstständigkeit. Auch für Angehörige oder Personen, die Pflegebedürftigen helfen, kann ein Rutschbrett eine große Erleichterung darstellen und rückenentlastend sein.

Unser Qualitätsversprechen an Sie

Für uns steht die Sicherheit des Anwenders im Vordergrund. Als Hersteller und Vertreiber von Medizinprodukten sind wir nach der **DIN EN ISO 9001** sowie der **DIN EN ISO 13485** geprüft und zertifiziert. All unsere Rutschbretter sind CE-gekennzeichnet und besitzen eine Hilfsmittelnnummer. Dadurch, dass wir unsere Rutschbrettern als Medizinprodukte Inverkehrbringen gewährleisten wir, dass unsere Produkte die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllen und das vorgeschriebene Konformitätsverfahren durchgeführt wurde. Somit erfüllen unsere Produkte auch die Anforderungen des Medizin-Durchführungsgesetz (MPDG) und der Medizinprodukte-Anwendermelde- und Informationsverordnung (MPAMIV).

Über Transatlantic

Ihre Kunden vertrauen Ihnen. Deshalb brauchen Sie einen Partner, dem Sie vertrauen können. Mit uns haben Sie einen Partner, der Sie in den Bereichen Medizinbedarf und Pflege professionell unterstützt und der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die bestmögliche Versorgung für Ihre Kunden sicherzustellen. Kompetente Unterstützung und Beratung erfahren Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte durch unsere qualifizierten Medizinprodukteberater.

Ob innovative Entwicklungen oder bewährte Produkte, unser Team findet mit Sicherheit die passende Lösung für Ihr Anliegen.

www.transatlantic.de

Transatlantic ist Vertriebspartner von:



frontier medical
Repose Antidekubitussysteme




Petermann
Pflege-Hilfsmittel für immobile Menschen



Alles an Board!

Rutschbretter von Transatlantic

CE-zertifiziert
vom deutschen
Hersteller

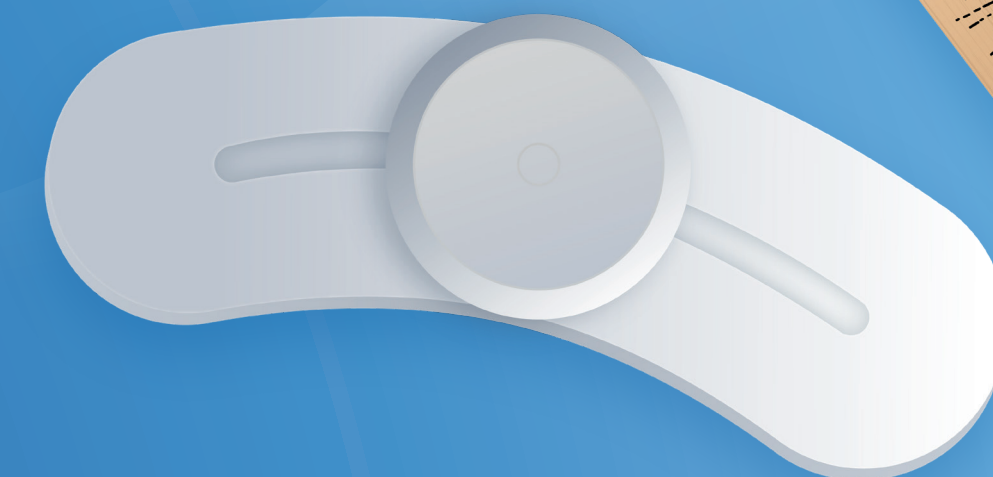

Transatlantic
Handelsgesellschaft
Stolpe & Co. mbH

Siemensstraße 7
61267 Neu-Anspach

Telefon: 06081 943050
Fax: 06081 943080

Mail: info@transat.de
www.transatlantic.de

Rutschbrett Silber Gleiter – der Klassiker in allen Bereichen

Die Silber Gleiter M und L haben eine von Therapeuten entwickelte Form, die sich seit vielen Jahren bewährt hat. Die Rutschbretter minimieren dank sehr glatter Oberfläche den Reibungswiderstand während Antirutschauflagen das Wegrutschen des Brettes auf der Unterlage verhindern.



Silber Gleiter M

67 x 22 cm
 Artikelnr. 4500414
 Hilfsmittelnr. 22.29.01.3017

Silber Gleiter L

85 x 25 cm
 Artikelnr. 4500415
 Hilfsmittelnr. 22.29.01.3018

Die Vorteile im Überblick:


- ✓ Einfacher Transfer zwischen Rollstuhl - Auto - Bett
- ✓ Einfache Handhabung durch großen Haltegriff
- ✓ Äußerst hygienisch durch eine glatte Rutschfläche ohne Rillen
- ✓ Mit allen gängigen Reinigungsmitteln leicht desinfizierbar
- ✓ Dezent und unauffälliges Design
- ✓ Belastbar bis 180 kg
- ✓ kaum sichtbare Anti Rutsch Auflagen, einfach und rückstandslos austauschbar
- ✓ CE-zertifiziertes Medizinprodukt mit Hilfsmittelnummer

Rutschbrett Beasy – das Pflegerutschbrett mit dem Drehteller

Um Scher- und Reibungskräfte zu vermeiden, sitzt man bei den Beasy Modellen sicher auf der selben Stelle, nämlich der Transferscheibe. Die Transferscheibe gleitet und dreht sich auch unter höchster Belastung immer gleichmäßig leicht.

Die Vorteile im Überblick sind:

- ✓ Leichtester Transfer durch gleitende Drehscheibe
- ✓ Einfacher Transfer zwischen Rollstuhl - Auto - Bett
- ✓ Einfache Handhabung durch großen Haltegriff auf der Rückseite
- ✓ Eindeutig vorgegebener Transferweg
- ✓ Besonders geeignet für schwere, ältere und/oder gebrechliche Menschen
- ✓ Erhebliche Erleichterung für Anwender, auch bei Hilfe durch weitere Person
- ✓ Mit allen gängigen Reinigungsmitteln leicht desinfizierbar
- ✓ Belastbar bis 200 kg
- ✓ CE-zertifiziertes Medizinprodukt

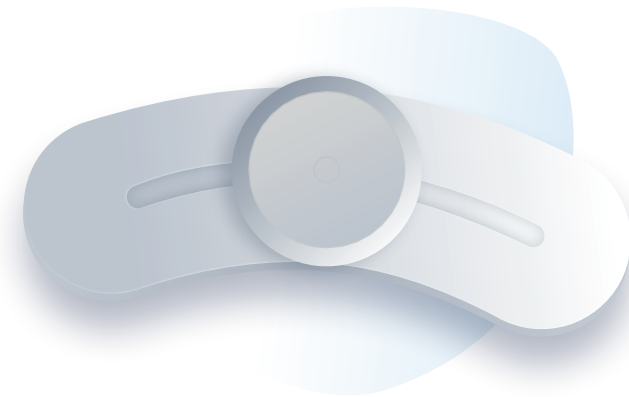

Beasy Glyder


80 x 26 cm
 Artikelnr. 4411080

Transporttasche
 Artikelnr. 4411501

Beasy II

68 x 30 cm
 Artikelnr. 4411068


Transporttasche
 Artikelnr. 4411500

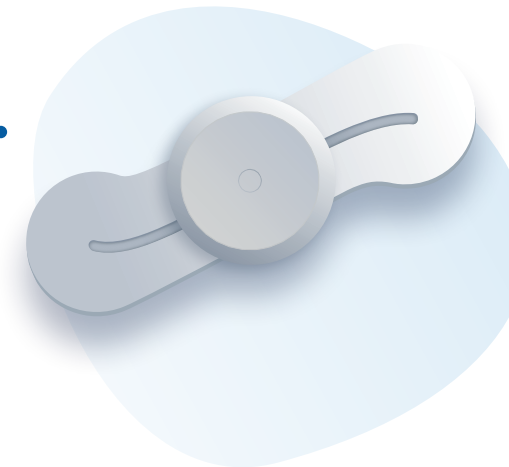

Beasy Trans

102 x 30 cm
 Artikelnr. 4411102

Transporttasche
 Artikelnr. 4411502

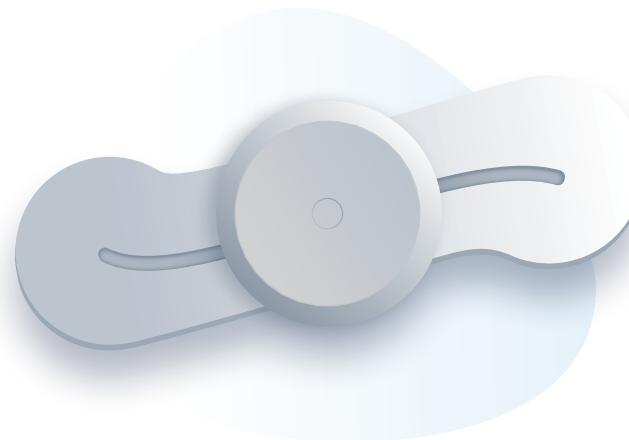

Rutschbrett meinHOLTZ
 65 x 24 cm
 Hilfsmittelnr. 22.29.01.3020

Rutschbrett meinHOLTZ – das Designprodukt mit individuellen Motiven

meinHOLTZ ist mehr als nur ein Rutschbrett. Es verbindet die für eine Transferhilfe notwendige Funktionalität und einfache Handhabung mit ansprechenden, modernen Designs. Gewöhnlich sind sie eher schlicht. Jetzt gibt es sie in tollen neuen Designs. Uns lag es am Herzen ein Produkt zu entwickeln, welches Design und optimale Funktionalität verbindet und was man gerne zeigt.

Die Vorteile im Überblick sind:

- ✓ Moderne Designs von schlicht bis bunt
- ✓ Einfacher Transfer zwischen Rollstuhl - Auto - Bett
- ✓ Von Therapeuten entwickelte Form
- ✓ Minimiertes Abrutschrisiko durch die sanfte Mulde auf der Oberseite
- ✓ Optimale Stabilität durch Mehrfachverpressung
- ✓ Entspricht Nachhaltigkeitsanforderungen durch Holz als nachwachsendem Rohstoff
- ✓ Mit allen gängigen Reinigungsmitteln leicht desinfizierbar
- ✓ Belastbar bis 150 kg
- ✓ CE-zertifiziertes Medizinprodukt mit Hilfsmittelnummer

Transa Sit On Tuch

30,5 x 58 cm
 Artikelnr. 4410525

Das Transa Sit On Tuch unterstützt die Gleitfähigkeit des Silber Gleiters und vereinfacht den Transfer bei nackter Haut.

Anti Rutschpads

Silber Gleiter M
 14,5 x 18 cm
 Artikelnr. 4500418

Silber Gleiter L
 20 x 20 cm
 Artikelnr. 4500419

Die Anti Rutschpads sind kaum sichtbar und sehr strapazierfähig. Sie können nach Bedarf ersetzt werden.



Kleiner DIY Tipp:

Handelsübliche Permanentmarker halten hervorragend auf dem Rutschbrett. So kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden.