


ANWENDUNG

1. Haut von Fett reinigen
2. Schutzpapier abziehen (bedruckt **Transafix®**)
3. In Position aufkleben, leicht andrücken
4. Schutzpapier von Lasche entfernen
5. Katheter/Tubus o. ä. in Klebeschicht einlegen
6. Klettlasche schließen (leicht anreiben)

DER KATHETER KANN MEHRFACH ENTNOMMEN UND WIEDER BEFESTIGT WERDEN!

Lageänderung Katheter:

1. Lasche öffnen
2. Katheter entnehmen (Klebeschicht bleibt)
3. Katheter einlegen und Lasche schließen

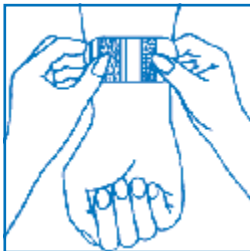

APPLICATION

1. clean the skin with alcohol
2. remove backing (marked **Transafix®**)
3. fix in position
4. remove backing from flap
5. place the catheter on sticky surface
6. Close the flap

TRANSAFIX® IS ADJUSTABLE

Adjusting the catheter

1. open the flap
2. adjust the catheter
3. close the flap