



Transatlantic

Produkte für eine heile Welt

Exklusiv Vertrieb:
Transatlantic HG Stolpe
& Co. mbH
Siemensstr. 7,
61267 Neu-Anspach

Gebrauchsanleitung Wandhalterung Rollboard

Transatlantic Artikel-Nr.: 4400086

ROTH **REF** 1486285 S



**Unbedingt vor der Benutzung diese
Informationen durchlesen und
aufbewahren!**

bestehend aus

1 Saugteller Ø 120 mm mit Vakuum Sicherheitsanzeige

1 Haken aus Edelstahl weiß beschichtet


1 Aufnahme aus PVC mit Schnellverriegler aus Edelstahl

Bestimmungsgemäßer Gebrauch mobiler Haken zur Aufnahme für Rollboards zur flexiblen Anbringung an allen planen und porenichten Flächen, wie z. B. Fliesen oder Glaswand etc.

Zerlegen und Montieren

Zerlegen: Schnellverriegler eindrücken (siehe Pfeil Bild 1) und den Trägeradapter aus dem festgehaltenen Sauggehäuse ziehen.

Montage: Schnellverriegler vom Trägeradapter eindrücken und in das Sauggehäuse stecken bis der Schnellverriegler in der großen Bohrung einrastet. **Sicheren Halt durch auseinanderziehen testen!**

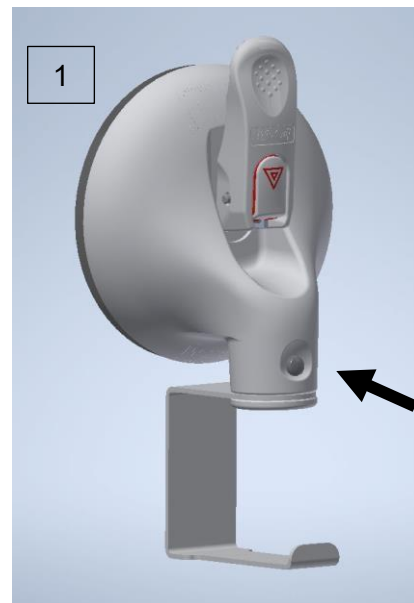

Befestigen:



Vor dem Gebrauch der mobilen Halterung für das Rollboard muss darauf geachtet werden, dass sowohl der Sauger als auch der Untergrund sauber sind. Den Sauger auf die anzusaugende, gereinigte Oberfläche fest andrücken. Dabei ist zu beachten, dass die Gummischeibe nicht über der Fuge angebracht wird. Die Gummischeibe muss dabei entspannt sein und flach aufliegen. Den Sauger andrücken und den Kipphebel umlegen, wobei der Widerstand der Unterdruckerzeugung deutlich spürbar sein muss.



Unbedingt die Vakuum-Sicherheitsanzeige beachten (Bild 2).

Lösen

Mit dem Finger unter den Kipphebel greifen und anheben, gleichzeitig mit dem Daumen den Rückschlageffekt verhindern. Die Gummischeibe kehrt in Ihre ursprüngliche flache Position zurück, und der Sauger kann von der Wand entfernt werden. Sollte die Gummischeibe dennoch festkleben (was gelegentlich bei ganz neuen Saugern passieren kann), heben Sie die Scheibe an einer Seite mit einem Finger an, so dass Luft unter diese gelangen kann. Den Sauger bei Nichtbenutzung mit entlasteter Gummischeibe auf ebener Fläche lagern.

2

Funktionsweise der Sicherheitswippe:
Das Vakuum wird permanent geprüft



**die volle
Haltekraft**



**Achtung: Das
Vakuum ist
verbraucht. Sofort
neu befestigen!**



Bitte beachten: Stellen Sie bitte keine Gegenstände unter den mobilen Haken, die beschädigt werden können, falls sich der Sauger löst.



Allergiker Hinweis: Die hochwertige Gummischeibe enthält Naturkautschuklatex. Naturkautschuklatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen.

Instandhaltung /Desinfektion

Halten Sie die Gummischeibe immer frei von Öl und Staub. Reinigen Sie die anderen Teile mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Der Haltegriff ist beständig gegen die Wirkstoffe der von der DGHM (Desinfektionsmittel-Kommission der deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) zertifizierten Hände- und Flächendesinfektionsmittel, mit Ausnahme von Phenoleder, Pyridinderivat und Thiocyanat.

Entsorgung

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwendung zugeführt. Die Metallteile werden der Altmittelverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Änderungen vorbehalten.

MOBELI®



ROTH® Sanitärprogramme GmbH
D-72213 Altensteig
Kohlbergstraße 5
Tel.: (+49) 07453/9381-0 Fax - 23
eMail: info@mobeli.de
Internet: www.mobeli.de