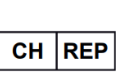


| <b>Technisches Datenblatt / Technical data sheet</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung<br><i>Item Identification</i>                | Transaroll Smartboard – Ambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Artikelnummer / Item Number                                     | 4400101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Artikelbild<br><i>Picture</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hersteller / Manufacturer                                       | Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH<br>Siemensstraße 7, 61267 Neu-Anspach (Germany)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einmalige Registriernummer<br><i>Single registration number</i> | DE-MF-000009432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zweckbestimmung<br><i>Intendend purpose</i>                     | Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten (z.B. von Bett zu Bett, von Bett zu Transportliege).<br><i>Transfer aid for repositioning patients (e.g. from bed to bed, from bed to stretcher).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material<br><i>Material</i>                                     | <p><u>Kern / Core</u><br/>Strukturkammernplatte aus Kunststoff, umhüllt mit PE-Schaumfolie, eingeschweißt in Hülle aus PES-Gewebe mit PVC-Beschichtung<br/><i>Plastic structural chamber plate, wrapped in PE foam film, shrink-wrapped in a PES fabric sleeve with a PVC coating</i></p> <p><u>Rolltuch / Cover</u><br/>MAR 2013, Polyester 280Dtex, blau, mit einseitiger PVC-Beschichtung<br/><i>MAR 2013, 280-denier polyester, blue, with a single-sided PVC coating</i></p> <p><u>Tragegriffe / Carry handles</u><br/>Stäbe aus thermoplastischen Kunststoff<br/><i>Rods of thermoplastic</i></p> |
| Reinigung<br><i>Cleaning</i>                                    | <p><b>Blauer Bezug</b><br/>Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Bei Verwendung von Bleichmitteln können sich die Funktionseigenschaften des blauen Bezuges nachhaltig verschlechtern. Der blaue Bezug kann mit Desinfektionslösungen auf Sauerstoffbasis problemlos desinfiziert werden.</p> <p><b>Board</b></p>                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                     | <p>Das Board selbst ist sehr widerstandsfähig und kann mit normalen Haushaltsreinigern gereinigt werden.</p> <p><b>Konventionelle Reinigung:</b> Verwenden Sie zum Reinigen warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Board ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen.</p> <p><b>Blue cover</b><br/><i>Do not use any abrasive or bleaching agents or sharp-edged objects for cleaning. The use of bleaching agents can permanently impair the functional properties of the blue cover.</i><br/><i>The blue cover can be easily disinfected with oxygen-based disinfectant solutions.</i></p> <p><b>Board</b><br/><i>The board itself is very resistant and can be cleaned with normal household cleaners.</i><br/><i>Conventional cleaning: Use warm water and a mild detergent for cleaning. If necessary, wipe the board with a damp cloth and then allow it to dry thoroughly.</i></p> |                            |
| Max. Belastbarkeit<br><i>max. load capacity</i>                                     | 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Abmessungen<br><i>Dimensions</i>                                                    | 86 x 40 cm faltbar / <i>foldable</i> : 86 x 40 cm (± 3%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Gewicht<br><i>Weight</i>                                                            | 2,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Zertifikate<br><i>Certificates</i>                                                  | Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485<br><i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Kontraindikation<br><i>Contraindication</i>                                         | Keine bekannten Kontraindikationen<br><i>No known contraindications</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Klassifizierung /<br>CE-Kennzeichnung<br><i>Classification /<br/>CE-Declaration</i> | Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 Anhang VIII<br><i>Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745 Annex VIII</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Lagerbedingungen<br><i>Storage Instructions</i>                                     | Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 30° C<br>Vor direkter Sonne schützen<br><i>Dry, Storage temperature: 10° to 30° C<br/>Keep away from direct sunlight</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Gebrauchsanweisung<br><i>Manual</i>                                                 | Gebrauchsanweisung beachten!<br>Attention to the user manual!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>Verkaufseinheiten/sales unit</b>                                                 | <b>Stück/pcs.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>UDI-DI</b>              |
| PRI / Box                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04050856035516(11)xx10(xx) |

| Produktkennzeichnung / Product labeling                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |
| Konformitätskennzeichnung<br>Mark of conformity                                   | Vor Nässe schützen<br>Keep dry                                                    | Vor Sonnenlicht fernhalten<br>Keep away from sunlight                             | Temperaturbegrenzung<br>Temperature limitation                                                                                             | Gebrauchsanweisung beachten<br>Observe operating instructions                     | Produktionsdatum<br>Observe operating instructions                                 | Chargen-/Lot-Nr.<br>Batch no./Lot no.                                               | Produktkennzeichnung<br>Unique Device Identification                                | Medizinprodukt<br>Medical Device                                                    |
|  |  |  |                                                           |                                                                                   |  |  |  |  |
| faltbar<br>foldable                                                               | Rutschgefahr<br>Slip hazard                                                       | Hersteller<br>Manufacturer                                                        | Die Überbrückung freier Transferebenen darf nicht mehr als 15 cm betragen<br>The bridging of free transfer levels must be not exceed 15 cm |                                                                                   | max. Gewichtsbelastung<br>Max. weight load                                         | Warnung<br>Warning                                                                  | Artikelnummer<br>Item-Number                                                        | Schweizer Bevollmächtigter<br>Swiss Representative                                  |