

Transafix® Nasalhalter und Band

Transafix® Nasal clip and strip

Transafix® Cerotto nasale e striscia nasale

Gebrauchsanweisung

D

1. Die Haut sorgfältig von Fett und Feuchtigkeit reinigen.
 2. Das Schutzpapier von den Nasalhaltern abziehen.
 3. Die Nasalhalter in der gewünschten Position aufkleben und leicht andrücken.
 4. Das Schutzpapier von dem Nasalband entfernen.
 5. Die Nasensonde mit der Klebefläche des Nasalbands umwickeln und andrücken.
 6. Das Nasalband an die Klettstreifen der Nasalhalter andrücken. (Der Nasalhalter kann jederzeit replaziert werden).
-

Instruction For Use

GB

1. Clean the skin carefully from oil and moisture.
2. Remove the backing of the nasal clip.
3. Apply the nasal clip and fix them by pressing lightly.
4. Remove the backing of the strip.
5. Wrap the strip around the nasal tube in the adhesive area.
6. Fix the strip to the velcro of the nasal clip (the adjustment of the nasal tube is always possible)

Applicazione



1. Detergere accuratamente la cute, rimuovendo eventuali tracce di grasso o umidità.
2. Rimuovere dai cerotti nasali la carta protettiva.
3. Applicare i cerotti nella posizione desiderata ed esercitare una delicata pressione su tutta la superficie.
4. Rimuovere la carta protettiva dal nastro fissante.
5. Posizionare il tubo in corrispondenza della superficie adesiva del nastro fissante ed esercitare una lieve pressione.
6. Premere il nastro fissante sulle strisce di velcro dei cerotti (il tubo può essere sostituito/riposizionato in qualsiasi momento).



- D** 1 **Nasalhalter, Hydrocolloid, unsteril** | REF 8210100
1 **Nasalhalter, Vlies, unsteril** | REF 8210200
1 **Nasalband, unsteril** | REF 8210300

- GB** 1 **Nasal clip, hydrocolloid, non-sterile** | REF 8210100
1 **Nasal clip, fleece, non-sterile** | REF 8210200
1 **Nasal strip, non-sterile** | REF 8210300

- I** 1 **Cerotto nasale, idrocolloidale, non sterile** | REF 8210100
1 **Cerotto nasale, in tessuto** | REF 8210200
1 **striscia nasale, non sterile** | REF 8210300

