



Das Antigleitkissen mindert die Möglichkeit des Herunterrutschens eines im Bett sitzenden Pflegebedürftigen. Es wird unter den Oberschenkeln des Pflegebedürftigen positioniert.

Sitzen ist eine wichtige Stufe der Mobilisation. Eine gute Sitzposition unterstützt alle Prophylaxen und die Teilhabe des Pflegebedürftigen.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Antigleitkissen	Polyethylen, latex frei	blau	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-8050	40 x 50	285 g	(01)04250355380500(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Antigleitkissen kann nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder bleichenden Mittel sowie keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften der Positionierungskeilen dauerhaft beeinträchtigen



Made in Germany